

## Commissione Regionale Dispositivi Medici

*(Delibera di Giunta n. 2277 del 22 novembre 2019)*

# Check list di verifica delle competenze: Reprocessing degli endoscopi flessibili per endoscopia digestiva



**Settembre 2022**

---

Le strutture possono utilizzare questo strumento di verifica delle competenze come modello per sviluppare il proprio strumento di valutazione delle competenze del personale incaricato del reprocessing degli endoscopi flessibili pluriuso e dei relativi accessori. Questo esempio di strumento è stato concepito per essere utilizzato nelle fasi di inserimento dei nuovi assunti e/o per la riverifica annuale del mantenimento delle competenze. Le strutture sono incoraggiate a utilizzare gli strumenti per verificare sia le competenze/conoscenze che le pratiche correnti, nonché per assicurare che le loro pratiche siano coerenti con gli elementi essenziali di un programma di reprocessing degli endoscopi flessibili.

La presente check list è frutto dell'adattamento del documento "HICPAC Sample Competency Verification Tool: Reprocessing Flexible Endoscopes". Copyright © 2016 AORN, Inc., 2170 South Parker Road, Suite 400, Denver, CO 80231.

Versione originale disponibile presso: <https://www.cdc.gov/hicpac/recommendations/flexible-endoscope-reprocessing.html>

**Nome:** \_\_\_\_\_ **Data:** \_\_\_\_\_

Legenda:

\***V** – visto, **S** – eseguito con supervisione, **A** – autonomo

\*\* **1** - Competenza non sufficiente, **2** – Competenza sufficiente ma necessita di rinforzo, **3** - Competenza soddisfacente, **4** – Competenza avanzata, può formare gli altri ad effettuare quel compito

Dichiarazioni di competenza/Criteri di performance	Livello di autonomia/competenze*	Livello di valutazione**	Data	Sigla tutor
<b>Trasporto dell'endoscopio pulito</b>  Trasporta l'endoscopio dalla sala di stoccaggio alla sala endoscopica o altro setting di utilizzo con carrelli, in idonei contenitori coperti e sanitizzati o in appositi sacchetti in polietilene e identificati come puliti.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____
	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____
	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____
	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____
Indossa correttamente i DPI previsti: Guanti, Camice monouso Impermeabile, Mascherina chirurgica, Copricapo	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____
	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____
	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____
	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____
<b>Pre-detersione</b>  Indossa correttamente I DPI previsti: Guanti, Camice monouso Impermeabile, Mascherina FFP2, Copricapo	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____
	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____
	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____
	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____

Dichiarazioni di competenza/Criteri di performance	Livello di autonomia/competenze*	Livello di valutazione**	Data	Sigla tutor
1. Esegue la pre-detersione degli endoscopi flessibili e degli accessori nel punto di utilizzo immediatamente dopo che l'endoscopio è stato rimosso dal paziente (o la procedura è stata completata) e prima che il materiale organico si sia asciugato sulla superficie o nei canali dell'endoscopio.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
2. Esegue la pre-detersione in conformità con le IFU del produttore dell'endoscopio: a. prima di ogni procedura prepara una soluzione detergente in conformità alle IFU del produttore e la sostituisce dopo ogni uso.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
b. pulisce le superfici esterne dell'endoscopio con un panno a basso rilascio di particelle o una spugna per uso specifico, imbevute della soluzione detergente.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
c. Rimuove i palloncini dagli eco-endoscopi ed enteroscopi e qualsiasi componente rimovibile dalla punta distale dell'endoscopio.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
d. Se indicato dal produttore applica la valvola di pulizia per sciacquare i canali aria/acqua.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____

Dichiarazioni di competenza/Criteri di performance	Livello di autonomia/competenze*	Livello di valutazione**	Data	Sigla tutor
e. Posiziona l'estremità distale dell'endoscopio nella soluzione detergente e aspira la soluzione ((almeno 250 ml) attraverso i canali dell'endoscopio e comunque prosegue finché la soluzione aspirata non viene fuori macroscopicamente pulita.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
○ Al termine, aspira aria dai canali per svuotarli della soluzione;	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
○ Presta attenzione alla pulizia di parti specifiche come ad es. l'elevatore dei duodenoscopi o la scanalatura di attacco del palloncino degli eco-endoscopi, secondo le indicazioni del produttore;	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
○ Ispeziona visivamente l'endoscopio per verificare la presenza di eventuali danni;	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
○ Se indicato dal produttore, disconnette lo strumento dalla fonte luminosa dopo aver spento la luce e posiziona il tappo di protezione dei contatti elettrici.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____

Dichiarazioni di competenza/Criteri di performance	Livello di autonomia/competenze*	Livello di valutazione**	Data	Sigla tutor
f. Elimina la soluzione detergente e il panno/spugna dopo l'uso.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____
<b>Trasporto dell'endoscopio sporco</b> Indossa correttamente i DPI previsti: Guanti, Camice monouso. (Se il trasporto in sala endoscopica viene fatto dallo stesso professionista che ha seguito l'endoscopia, dopo aver eseguito la pre-detersione e aver riposto l'endoscopio nel contenitore di trasporto, è necessario provvedere alla sostituzione di camice e guanti).	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____
3. Trasporta l'endoscopio flessibile e gli accessori nella sala di reprocessing il più presto possibile dopo l'uso.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____
4. Trasporta gli endoscopi e gli accessori contaminati nell'area di reprocessing in un contenitore chiuso o in un carrello di trasporto chiuso.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____
a. Utilizzare un contenitore a prova di perdite, resistente alle forature e sufficientemente grande da contenere tutto il contenuto.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____ _____	_____ _____ _____ _____

Dichiarazioni di competenza/Criteri di performance	Livello di autonomia/competenze*	Livello di valutazione**	Data	Sigla tutor
5. Etichetta il carrello o il contenitore di trasporto con una etichetta che identifica lo strumento come contaminato.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
<b>Test di tenuta</b> Indossa correttamente i DPI previsti: Camice monouso Impermeabile, Occhiali di protezione, Guanti nitrile, Mascherina FFP2, Copricapo.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
6. Esegue il test di tenuta prima della pulizia manuale e prima di inserire l'endoscopio nelle soluzioni di pulizia.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
7. Esegue i test di tenuta in conformità con le IFU dei produttori di endoscopi e di apparecchiature per il controllo delle perdite e in base ai seguenti criteri	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
a. Rimuove le valvole di aspirazione, di insufflazione e il tappo del canale operativo	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____

Dichiarazioni di competenza/Criteri di performance	Livello di autonomia/competenze*	Livello di valutazione**	Data	Sigla tutor
b. Esegue prima un test di tenuta a secco seguendo le IFU del produttore, in caso di superamento provvede, ad una nuova esecuzione del test visivo mantenendo lo strumento in immersione; agendo sui tiranti U/D e R/L per controllare che non vi siano microperforazioni	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____
	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____
	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____
c. Pressurizza l'endoscopio alla pressione consigliata.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____
	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____
	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____
8. Quando un endoscopio non supera un test di tenuta, lo rimuove dal servizio senza riprocessarlo e lo si invia per la riparazione o la sostituzione secondo la politica e la procedura della struttura.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____
	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____
	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____
9. Effettua sempre il test di tenuta anche se la lava-endoscopi è dotata di questa funzione.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____
	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____
	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____
<b>Detersione manuale</b> Indossa correttamente i DPI previsti: Camice monouso impermeabile, Occhiali di protezione, Guanti nitrile, Mascherina FFP2, Copricapo (gli stessi indossati per il test di tenuta).	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____
	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____
	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____	_____

Dichiarazioni di competenza/Criteri di performance	Livello di autonomia/competenze*	Livello di valutazione**	Data	Sigla tutor
10. Esegue la pulizia manuale in conformità alle IFU del produttore dell'endoscopio.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
11. Esegue la detersione manuale il prima possibile (entro 60 minuti dal termine della procedura, preferibilmente entro 15 minuti).	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
12. In caso di utilizzo di Simecicone durante la procedura, la detersione manuale viene eseguita entro 15 min dal termine della stessa.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
13. Quando non è possibile avviare il processo di pulizia entro i tempi indicati, segue le IFU del produttore per il trattamento ritardato.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
14. Non lascia gli endoscopi flessibili immersi nelle soluzioni di pulizia enzimatica oltre il tempo di contatto previsto dal produttore dell'endoscopio, a meno che ciò non sia raccomandato nelle IFU del produttore per un trattamento ritardato.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____

Dichiarazioni di competenza/Criteri di performance	Livello di autonomia/competenze*	Livello di valutazione**	Data	Sigla tutor
15. Segue le IFU del produttore della soluzione detergente (concentrazione, diluizione, temperatura dell'acqua, tempi di contatto ecc.).	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
16. Immerge completamente l'endoscopio nella soluzione detergente durante il processo di pulizia.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
a. Stacca le parti rimovibili (ad esempio, valvole, pulsanti, tappi) dall'endoscopio e le immerge se raccomandato dalle IFU del produttore dell'endoscopio.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
17. Pulisce tutte le superfici esterne dell'endoscopio con un panno a basso rilascio di particelle o una spugna per uso specifico, imbevute della soluzione detergente.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
18. Pulisce tutti i canali accessibili e l'estremità distale dell'endoscopio con una spazzola di pulizia della lunghezza, larghezza e materiale raccomandati dal produttore dell'endoscopio.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____

Dichiarazioni di competenza/Criteri di performance	Livello di autonomia/competenze*	Livello di valutazione**	Data	Sigla tutor
19. Aziona manualmente le valvole dell'endoscopio durante la loro pulizia.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
20. Pulisce e spazzola il meccanismo dell'elevatore (se presente) e le cavità che lo circondano con una spazzola di lunghezza, larghezza e materiale raccomandati dal produttore dell'endoscopio.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
a. Solleva e abbassa il meccanismo dell'elevatore durante il processo di pulizia manuale.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
21. Utilizza una spazzola pulita e disinfettata o monouso per ogni pulizia dell'endoscopio.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
a. Ispeziona visivamente le spazzole e gli altri oggetti utilizzati per pulire i canali dell'endoscopio prima dell'uso e non li utilizza se l'integrità della spazzola o di altri oggetti di pulizia è in compromessa.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____

Dichiarazioni di competenza/Criteri di performance	Livello di autonomia/competenze*	Livello di valutazione**	Data	Sigla tutor
22. Spazzola più volte i canali accessibili dell'endoscopio fino a quando non compaiono più detriti sulla spazzola.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
a. Pulisce con uno scovolino corto, per almeno tre volte, i cilindri di aspirazione, aria/acqua e l'ingresso del canale bioptico.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
23. Pulisce con uno scovolino lungo i canali di aspirazione e bioptico, assicurandosi che lo stesso esca dalla estremità opposta del canale. Ripete questa azione finché lo scovolino non esce macroscopicamente pulito.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
24. Per evitare contaminazioni retrograde, durante la "scovolinatura", ad ogni passaggio, fa uscire la punta dello scovolino dalla punta del DM e la sciacqua sotto un getto di acqua prima di ritirare lo scovolino stesso.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
25. Applica correttamente la slitta di chiusura dei cilindri di aspirazione, insufflazione e il tappo del canale operatore. Collega i raccordi dedicati per la pulizia del DM	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____

Dichiarazioni di competenza/Criteri di performance	Livello di autonomia/competenze*	Livello di valutazione**	Data	Sigla tutor
26. Lava i canali dell'endoscopio con la soluzione detergente. L'irrigazione dei canali con soluzione detergente può essere seguita con siringhe adatte o con pompe dedicate, per il tempo stabilito dal produttore del detergente	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
27. Sciacqua e risciacqua le superfici esterne e interne dell'endoscopio con acqua fino a rimuovere tutta la soluzione detergente e i detriti residui.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
28. Spurga attentamente i canali per rimuovere i residui di acqua del risciacquo	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
29. Pulisce, spazzola, risciacqua, asciuga e disinfetta o sterilizza ad alto livello tutte le parti riutilizzabili (ad esempio, valvole, pulsanti, tubi, bottiglie d'acqua), gli accessori (ad esempio, pinze) e gli strumenti di pulizia (ad esempio, spazzole, adattatori per la pulizia dei canali).	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
a. Disinfetta o sterilizza ad alto livello le bottiglie di irrigazione seguendo le IFU del produttore.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____

Dichiarazioni di competenza/Criteri di performance	Livello di autonomia/competenze*	Livello di valutazione**	Data	Sigla tutor
30. Elimina accessori e strumenti di pulizia monouso dopo ogni utilizzo e non li ricicla.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
31. Elimina la soluzione detergente dopo ogni utilizzo.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
<b>Ispezione</b> 32. Ispeziona visivamente e valuta gli endoscopi, gli accessori e le attrezzature per <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pulizia,</li> <li>b. Parti mancanti,</li> <li>c. Chiarezza delle lenti,</li> <li>d. Integrità delle guarnizioni,</li> <li>e. Umidità,</li> <li>f. Danni fisici o chimici,</li> <li>g. Funzione.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
33. Rimuove gli endoscopi, gli accessori e le apparecchiature difettose dal servizio e li invia per la riparazione o la sostituzione secondo le politiche e le procedure della struttura.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____

Dichiarazioni di competenza/Criteri di performance	Livello di autonomia/competenze*	Livello di valutazione**	Data	Sigla tutor
<b>Disinfezione di alto livello</b> Esegue l'alta disinfezione automatica rispettando le IFU del produttore.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
34. Controlla la data di scadenza del disinfettante ad alto livello prima di ogni utilizzo.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
a. Verifica la compatibilità tra l'endoscopio e la lava-endoscopi meccanica prima del ciclo di disinfezione.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
b. Posiziona l'endoscopio e gli accessori pluriuso all'interno della lava-endoscopi in modo da garantire il contatto delle soluzioni di trattamento con tutte le superfici dell'endoscopio.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____
c. Assicura che tutti i connettori tra l'endoscopio e la lava-endoscopi siano collegati correttamente, seguendo le IFU del produttore.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	_____ _____ _____	_____ _____ _____

Dichiarazioni di competenza/Criteri di performance	Livello di autonomia/competenze*	Livello di valutazione**	Data	Sigla tutor
<p>d. Controlla il ciclo di disinfezione automatica per verificare che sia completato come programmato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ripete l'intero ciclo se interrotto o non completato come programmato.</li> <li>• Esegue un doppio ciclo di disinfezione automatica se è stato utilizzato il Simeicone durante la procedura endoscopica.</li> <li>• Archivia il ticket rilasciata dalla lava-endoscopi se rilasciato.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/>
<p><b>Asciugatura</b></p> <p>Indossa correttamente i DPI previsti: Copricapo, Guanti puliti, Mascherina chirurgica, Inserti auricolari (solo nella fase di asciugatura con aria compressa).</p>	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/>
<p>Se non è presente un armadio di stoccaggio, asciuga lo strumento accuratamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esegue l'asciugatura esterna con un panno pulito a basso rilascio di particelle</li> <li>• Esegue l'asciugatura dei canali accuratamente con aria microfiltrata di tipo medicale forzata a pressione regolata.</li> <li>• Asciuga tutte le parti rimovibili e gli accessori dell'endoscopio.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/>
<p><b>Alcolizzazione dei canali</b></p> <p>Se indicato dalle IFU del produttore esegue l'alcolizzazione dei canali dell'endoscopio con alcol etilico o isopropilico al 70%-90, prima dello stoccaggio.</p>	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/>

Dichiarazioni di competenza/Criteri di performance	Livello di autonomia/competenze*	Livello di valutazione**	Data	Sigla tutor
<b>Sterilizzazione</b>	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>		
35. Confeziona e sterilizza gli endoscopi e gli accessori per endoscopi in conformità alle IFU del produttore.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>		
		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>		
<b>Stoccaggio</b>	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>		
36. Conserva gli endoscopi flessibili negli appositi armadi di stoccaggio in conformità alle IFU dei produttori di endoscopi e armadietti di stoccaggio.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>		
Se stoccati in armadi con funzione di asciugatura si assicura che tutti i canali dell'endoscopio siano correttamente collegati agli appositi adattatori per la ventilazione dell'aria.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>		
		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>		
a. Conserva gli endoscopi flessibili con tutte le valvole aperte e le parti rimovibili staccate, ma conservate con l'endoscopio salvo che le stesse non seguano un diverso percorso di sterilizzazione.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>		
		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>		
37. Indossa guanti puliti quando maneggia gli endoscopi trattati e li trasporta da e verso l'armadio di stoccaggio.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>		
		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>		
38. Ispeziona visivamente gli endoscopi e gli armadietti di conservazione per verificarne la pulizia prima di inserirli o rimuoverli dall'armadietto.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>		
		1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>		

Dichiarazioni di competenza/Criteri di performance	Livello di autonomia/competenze*	Livello di valutazione**	Data	Sigla tutor
39. Immagazzina gli articoli sterili in un'area di stoccaggio sterile secondo le politiche e le procedure della struttura.	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<b>Tracciabilità</b> 40. Registra le seguenti informazioni di elaborazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data e ora;</li> <li>b. Identificativo del paziente o numero della cartella clinica;</li> <li>c. Identificativo dell'endoscopista che esegue la procedura;</li> <li>d. Modello e numero di serie dell'endoscopio;</li> <li>e. Modello e numero di serie della lava-endoscopi e ticket di avvenuta disinfezione;</li> <li>f. Metodo e verifica della pulizia e risultati dei test di verifica della pulizia;</li> <li>g. Identificativo degli operatori che si sono occupati del reprocessing (ogni fase);</li> <li>h. Tempi delle attività di ritrattamento;</li> <li>i. Prove delle prestazioni delle apparecchiature e registri di manutenzione.</li> </ul>	<input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> A	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

---

**Questa sezione deve essere completata dal coordinatore:**

Il dipendente sottoindicato ha completato le attività di verifica delle competenze richieste dalla struttura in relazione al reprocessing degli endoscopi flessibili.

SI

NO (necessita di un ulteriore periodo di formazione come descritto nel successivo piano d'azione)

**Piano d'azione:**

Nome del dipendente: \_\_\_\_\_ Firma del dipendente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Nome del valutatore: \_\_\_\_\_ Firma del valutatore: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Nome del responsabile: \_\_\_\_\_ Firma del responsabile: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_